


# Ozon jako miejscowe leczenie zakażonych ran skóry

Przypadek: Terapia ozonem zakażonej rany powstałej po zabiegu usunięcia torbieli włosowej. Podawano ozon 2 razy w tygodniu przez 4 tygodnie (foto 1-3). Zdjęcie nr 4 wykonano 2 tygodnie po ostatnim ozonowaniu. Stosowano także opatrunki antybakteryjne.

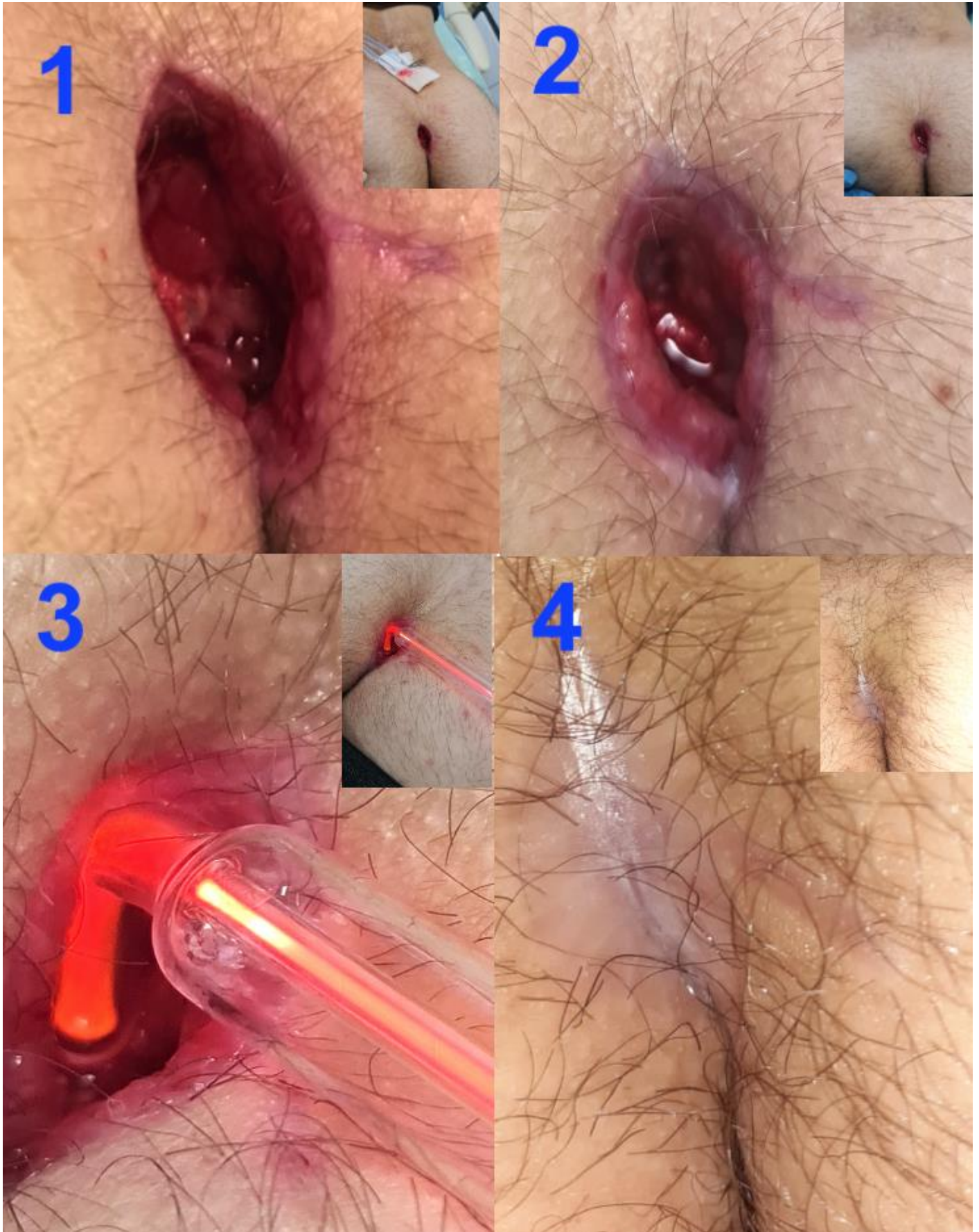

## Zakażenia ran skóry i tkanek miękkich są rosnącym źródłem zachorowalności i śmiertelności pacjentów na całym świecie przede wszystkim z powodu rosnącej oporności na antybiotyki. Wyniki tysięcy badań wskazują na ozon, jako lek skuteczny w terapii ran.

Źródło: artykuły naukowe publikowane na platformie PubMed (strona internetowa rządu USA) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>  
Ozone as a Topical Treatment for Infected Dermal Wounds<sup>1</sup> The Biological and Molecular Action of Ozone and Its Derivatives<sup>2</sup>



Ozone DTA - medyczny generator ozonu emituje ozon w stężeniu terapeutycznym, który jest dostarczany na dowolnie wybrany obszar skóry lub błony śluzowej. Przyspiesza gojenie ran poprzez dezynfekcję, dotlenienie, odbudowę krążenia i modulację odpowiedzi immunologicznej. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo nie uszkodzając zdrowych tkanek i nie powodując objawów ubocznych. Nie jest znana bakteria chorobotwórcza, wirus, czy grzyb odporny na terapeutyczne dawki ozonu.

TABELA ZASTOSOWAŃ Przy leczeniu łączonym z opatrunkami ilość sesji może być mniejsza o połowę.

Diagnoza	moc	Czas w min.	Aplikacja	Zabiegi	Powt.
Wyprysk, liszaj	6	5-10	Na zainfekowaną skórę	2 w tyg.	6 - 8
Zaburzenia gojenia się rany	6	3-10	Na ranę przykrytą jałową gazą	codziennie	3
Owrzodzenia podudzia	6	3-10	Na ranę przykrytą jałową gazą	2 w tyg.	4
Oparzenia	6	3	Powierzchnia oparzona	2 w tyg.	4 - 6
Odmrożenia	6	12	Powierzchnia odmrożona	2 w tyg.	4 - 6
Łuszczyca	9	3-10	Na zainfekowaną skórę	2 w tyg.	6 - 8
Półpasiec	9	5-20	Na bolący obszar	2 w tyg.	6
Opryszczka, afta, czyrak, trądzik	9	1-2	Na każdy pojedynczy obszar i jego granice	codziennie	1- 3
Wrzód goleni miękkiej/twardej, owrzodzenia zewnętrzne	12	5-10	Na obszar bolący	2 w tyg.	4 - 6
Odleżyny	9	5-20	Na obszar przykryty jałową gazą	codziennie	5
Zapalenie stawów	12	1-3	Na obszar bolący i okolice	codziennie	4
Brodawka pospolita, płaska	12	1-3	Na każdy poj. Obszar i granice	2 w tyg.	6
Owłosiona skóra, zaburzenia cebulek włosowych	6	2	Na każdy obszar na skórze	2 w tyg.	3 - 6
Kaszak	12	2	Na każdy obszar i jego granice	2 w tyg.	6
Krwiak	12	5	Na każdy obszar i jego granice	2 w tyg.	6



[facebook.com/Redeemedical](https://facebook.com/Redeemedical)

[www.redee.pl](http://www.redee.pl) [biuroredee@gmail.com](mailto:biuroredee@gmail.com)



**Redeé**<sup>TM</sup>

telefon **632887276 531988335 669951093**